


Orientações para uso e conservação:

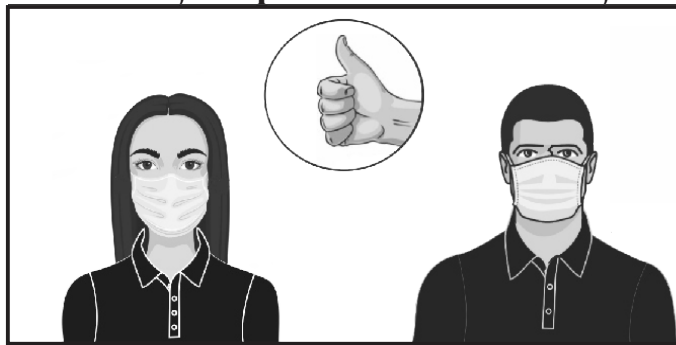

Essa máscara reutilizável é produzida com tricolina de tela bem ajustada, permitindo assim uma boa respiração e servindo ao mesmo tempo como elemento de proteção, possui também modelagem e elásticos anatômicos, que permitem o melhor ajuste ao seu rosto. É recomendável que cada pessoa tenha entorno de 5 (cinco) máscaras de uso individual. Procure usar cada uma por até 3 horas.

Antes de usar assegure-se que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas), ao vesti-la procure ajustar o elástico e o tecido de maneira que você sinta todo o conjunto em contato com sua face, protegendo principalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços laterais. Nunca ajuste para encostar o tecido no nariz e boca, mantenha sempre o conforto e espaço para respiração. É normal nas primeiras horas sentir um leve desconforto, se quiser você pode esticar levemente o elástico com movimentos suaves de vai e vem (fig.1) e ajustar de forma gradativa até sua completa adaptação. Em casos em que desejar maior compressão, você pode vestir (na orelha) o elástico em "X", ou inserir um pequeno nó em cada uma das laterais, no ponto em que achar mais confortável.

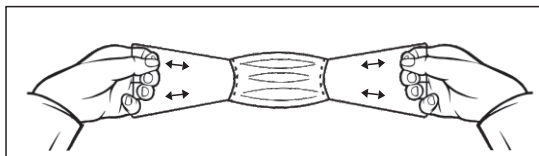


Fig.1

Querendo aumentar a proteção, ou prolongar o uso, você pode acondicionar uma lamina de papel filtro (mod. tam. 102) na parte interna da máscara (fig.2), sempre respeitando o espaço (interno), conforto para respiração e tempo (validade) para troca do refil - papel filtro. (Este kit não acompanha papel filtro).

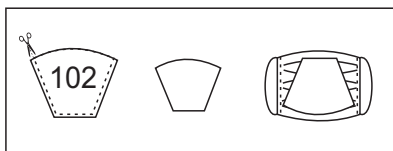


Fig.2

Esse kit contém ainda uma mini sacola vermelha para o descarte diário das máscaras usadas. Lembre-se de higienizar essa sacola todos os dias, após o uso, com preparação alcoólica a 70%. Atenção esse conjunto é de uso individual e não deve ser compartilhado com ninguém (isso vale até mesmo para pessoas muito próximas).

Cuidados para a manutenção e reutilização:

A lavagem é bem simples e não requer uso de máquinas, no entanto caso seja sua opção, lave pelo modo "delicada". Use o sabão de sua preferência ou água sanitária diluída em água, consulte sobre as quantidades e o tempo do molho nas embalagens dos produtos que serão utilizados na higienização, não há necessidade de escovar, você pode se quiser também usar água morna, enxague bem, e posicione a peça para secagem à sombra. É permitido o uso de ferro elétrico, para passadoria, apenas no tecido.

Contra-indicação: As máscaras faciais de uso não profissional não devem ser utilizadas pelos: profissionais de saúde durante a sua atuação; pessoas que cuidam de pacientes contaminados; crianças menores de 2 anos, em pessoas com problemas respiratórios ou inconscientes, incapacitadas ou incapazes de remover a máscara sem assistência; e demais pessoas, e ou casos, contraindicados pelos profissionais de saúde.

Procure respeitar os distanciamentos em seus contatos e filas. Evite aglomerações. Higienize as mãos constantemente. E siga também demais orientações de prevenção e proteção que estão sendo amplamente divulgadas.

IMPORTANTE:

COMO EM QUALQUER PEÇA NOVA DE VESTUÁRIO, PARA PRIMEIRO USO RECOMENDAMOS A LAVAGEM.